

Gebrauchsanweisung

Benetzende Augentropfen mit Hyaluronsäure & Allantoin – zur natürlichen Befeuchtung und Unterstützung der Zellregeneration

Hylo-Vision® HD plus

15 ml Augentropfen (Musterpackung: 5 ml)
0,2% Natriumhyaluronat mit Allantoin

Anwendung:

- Schützt und befeuchtet die Augenoberfläche und macht sie gleitfähig.
- Zur Linderung bei Trockenheitsgefühl und bei leichter, nicht als pathologisch einzustufender Reizung durch umgebungsbedingte Befindlichkeitsstörungen des Auges wie z. B. Brennen, Ermüdung, langes Arbeiten vor dem Bildschirm oder Tragen von Kontaktlinsen.
- Unterstützt als wohltuender Feuchtigkeitsspender die Zellregeneration.
- Geeignet für Kontaktlinsen jeden Typs.

Gegenanzeigen:

Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

Wechselwirkung mit anderen Mitteln:

Nicht gleichzeitig mit Arzneimitteln oder anderen Produkten, welche auf das Auge aufgetragen werden, anwenden, da Hylo-Vision® HD plus deren Wirkung verändern kann.

Produktbeschreibung:

Hylo-Vision® HD plus 15 ml Augentropfen enthalten 0,2% hochgereinigtes Natriumhyaluronat und Allantoin in Phosphat-gepufferter Kochsalzlösung mit Polyhexanid, einem sanften Konservierungsmittel. Natriumhyaluronat ist eine natürliche Substanz, die auch im menschlichen Auge vorkommt. Das eingesetzte Natriumhyaluronat ist nicht tierischen Ursprungs, sondern wird fermentativ gewonnen. Allantoin ist ein pflanzlicher Wirkstoff, der beispielsweise aus der Pflanze Beinwell gewonnen wird. Der Ophthalmieninhalt wurde durch Filtration sterilisiert; die Keimfreiheit ist nur bei unversehrter Ophthalmie gewährleistet.

Zusammensetzung:

1 ml Lösung enthält 2 mg hochgereinigtes Natriumhyaluronat, Allantoin, 0,0015 mg Polyhexanid (PHMB), 0,1 mg Natriumedetat (EDTA), isotonischen Phosphatpuffer, gereinigtes Wasser.

Dosierung:

Bei Bedarf 1–2 Tropfen Hylo-Vision® HD plus in den Bindehautsack einträufeln.

Gebrauchshinweise:

- Hände sorgfältig waschen und abtrocknen.
- Ophthalmie auf ihre Unversehrtheit prüfen, um sicherzustellen, dass der Inhalt keimfrei ist.
- Zum Öffnen den Schraubverschluss entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Brechen des Sicherheitsverschlusses drehen.
- Ophthalmie mit der Öffnung nach unten halten und pro Auge je 1–2 Tropfen einträufeln. Durch Lidschlag wird die Lösung verteilt und bildet eine transparente Flüssigkeitsschicht auf der Augenoberfläche. Achten Sie darauf, dass das Auge nicht mit der Ophthalmie in Berührung kommt, um Verletzungen oder Infektionen zu vermeiden.
- Die Augentropfen können zusammen mit Kontaktlinsen jeden Typs verwendet werden. Für Erwachsene und Kinder geeignet.

Lagerung:

Bei Temperaturen von 2–25 °C. Nicht gefrieren lassen. Nach Öffnung 3 Monate haltbar. Vor Licht- bzw. Sonneneinstrahlung schützen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Aufbewahrung des Präparates:

Die Lösung soll nach Ablauf des auf der Verpackung genannten Verfalldatums nicht mehr verwendet werden. Zu beachten: Nicht verwenden, wenn die Ophthalmie beschädigt ist. Nicht verwenden, wenn die Flüssigkeit trüb ist oder eine Färbung aufweist. Das Auge nicht mit der Ophthalmie berühren. Bei Nebenwirkungen jeglicher Art fachärztlichen Rat einholen.

Stand der Gebrauchsinformation:

Februar 2012

Medizinprodukt

CE 0473



OmniVision GmbH

Lindberghstraße 7
82178 Puchheim
Deutschland
Telefon +49 (0)89-84 07 92-30
Telefax +49 (0)89-84 07 92-40
www.omnivision.de
info@omnivision.de

OmniVision Ges.m.b.H.

Eichenstraße 32
1120 Wien
Österreich
Telefon +43 (0)1 81358-62
Telefax +43 (0)1 81358-63
www.omnivision.at
info@omnivision.at