

# PEDI SOFT®

Zehenseparator  
aus Silikon  
2 Stück **large**  
Art.-Nr. 107 020

**bort**  
BORT MEDICAL



# PEDI SOFT®

Zehenseparator  
aus Silikon  
2 Stück **large**

Vertrieb in der Schweiz:  
Orthosan AG • CH-3042 Ortschaften • Tel. 0848 800 333

BORT GmbH • Postfach 1330 • D-71367 Weinstadt



Art.-Nr. 107 020 large

417-107020I/D-01/25 nm



LOT:

Id | IId | IIId | IVd | le | lle | IIIe | IVe

# PEDI SOFT®



## Sanfter Fußschutz aus Silikon



Art.-Nr. 107 010



Art.-Nr. 107 030



Art.-Nr. 107 050



Art.-Nr. 107 060



Art.-Nr. 107 070



Art.-Nr. 107 080



Art.-Nr. 107 100



Art.-Nr. 107 110



Art.-Nr. 107 120

### Funktion:

PEDISOFT® Zehenseparator aus Silikon trennt verlagerte und eng anliegende Zehen und dient so als Korrekturhilfe. Er schützt vor Wundreiben, Hautreizungen und Hühneraugen zwischen den Zehen. Er ist physiologisch unbedenklich und verursacht keine Pilzgefahr in den Zehenzwischenräumen.



### Vorteile durch Silikon:

**dauerhaft und strapazierfähig**

**sehr weich und glatt**

**hautfreundlich und hygienisch**

**dank Memory-Effekt optimale Anpassung, nach dem Tragen sofortige Rückkehr in die ursprüngliche Form**

**PEDISOFT®**

**Zehenseparator**

### Anwendung:

Auf gereinigter, trockener Haut anwenden. Direkt zwischen die Zehen legen. Das weiche Material passt sich der Kontur der Zehen optimal an und haftet sicher, ohne zu verrutschen oder Reibung und Laufmaschen an Socken und Strümpfen zu verursachen.

### Pflegehinweis:

Zur Reinigung mit Seife waschen, gut trocknen lassen und **ein-pudern**.