

BIO-AKTIV Multi-Mam[®] Kompressen

Multi-Mam

Multi-Mam bio-aktive Kompressen - für die natürliche Pflege und Behandlung wunder und gereizter Brustwarzen

- Wirkt sofort beruhigend auf wunde Brustwarzen
- Schützt vor schädlichen Mikroorganismen und beugt Infektionen (Mastitis) vor
- Unterstützt die natürliche Wundheilung
- Optimiert den Gewebeszustand der Brustwarzenhaut
- Gel kann unbedenklich geschluckt werden und muss vor dem Stillen nicht entfernt werden
- Gel enthält nur natürliche Inhaltsstoffe, ohne Konservierungsstoffe
- einzigartige Anwendung mittels weicher, schützender Komresse

Risse und wunde Brustwarzen, Schmerzen beim Stillen
Wunde, verletzte, rissige oder schmerzende Brustwarzen sind ein Hauptgrund, das Stillen zu beenden. Durch die teils sehr starken Schmerzen kann zudem das Mutter-Kind-Verhältnis gestört werden, denn jedes Stillen wird als Qual und nicht als liebendes Zusammensein empfunden.

Schmerzende Brustwarzen können darüber hinaus auch den Milchspendereflex hemmen. Dadurch verkrampft sich die Mutter zunehmend, was oft zum frühen Abstillen führt. Rissige Brustwarzen entstehen durch eine Kombination aus externer, mechanischer Belastung und ungenügender Befeuchtung der obersten Hautschicht. Infektionen werden dadurch begünstigt. Auch wenn es vor allem wichtig ist, die Ursache zu beseitigen (z.B. falsche Positionierung und Anlegetechnik des Babys), muss die irritierte Brustwarze einem genügend feuchten Milieu ausgesetzt werden, um den Heilungsprozess zu unterstützen. Mit der Anwendung der Multi-Mam bio-aktiven Kompressen erhält die Mutter eine zeitgemäße Möglichkeit zur Linderung der Symptome und zur natürlichen Unterstützung der Wundheilung. Die mit einem bio-aktiven Gel getränkten Kompressen erhalten ein feuchtes Milieu, unterstützen die Wundheilung und schützen die Brustwarze gegen mechanische Reize.

Was sind Multi-Mam bio-aktive Kompressen?

Die Multi-Mam bio-aktiven Kompressen wurden speziell für stillende Mütter zur intensiven Pflege und Behandlung wunder und gereizter Brustwarzen entwickelt.

Eine Multi-Mam bio-aktive Komresse ist ein weiches, bequemes Schutzpad, das mit einem bio-aktiven Gel getränkt ist. Das Gel basiert auf dem patentierten 2QR-Komplex, der in seiner Fähigkeit, schädliche Mikroorganismen (z.B. Bakterien, Pilze) sicher und natürlich zu hemmen, einzigartig ist. Durch dieses Gel haben die Kompressen eine direkt beruhigende Wirkung auf wunde Brustwarzen, optimieren den Gewebeszustand der Haut, verringern Schwellungen und beugen Infektionen vor. Das Gel basiert auf rein pflanzlichen, natürlichen Bestandteilen, welche völlig unschädlich sind und unbedenklich geschluckt werden können. Das Gel muss vor dem Stillen nicht entfernt werden. Der Geschmack des Gels ist nicht unangenehm für das Kind. Die dünne Beschichtung der Rückseite verhindert das Beflecken des Büstenhalters. Somit sind die Multi-Mam bio-aktiven Kompressen ideal für die Behandlung von wunden und gereizten Brustwarzen, welche durch das Stillen entstehen.

Wie verwenden Sie Multi-Mam Kompressen?

Die Multi-Mam Kompressen sind einzeln in Briefchen verpackt und sollten zwischen dem Stillen aufgelegt werden. Öffnen Sie das Päckchen, entfalten Sie die Komresse und legen Sie die Seite mit dem Gel auf Ihre Brustwarze. Lassen Sie die Komresse solange auf der Brustwarze liegen bis das Gel eingezogen ist. Wenn möglich entfernen Sie das Pad ca. eine halbe Stunde vor dem Stillen und legen Sie es dann wieder auf. Das Gel muss vor dem Stillen nicht entfernt werden. Wiederholen Sie die Behandlung mindestens 2 mal täglich bis die Irritationen verschwunden sind. Eine Komresse sollte jeweils für eine Anwendung benutzt werden. Liegen aber nicht mehr als 3 Stunden zwischen 2 Stillintervallen, kann die Komresse ein zweites mal verwendet werden. Die Komresse wird direkt auf die Brustwarze gelegt und unter dem BH und der Stilleinlage getragen.

Tipp: gekühlt aus dem Kühlschrank hat die Komresse eine zusätzliche angenehme Wirkung.

Bestandteile:

Das bio-aktive Gel basiert auf natürlichen, pflanzlichen Bestandteilen. Es wurden keine schädlichen Nebenwirkungen beobachtet, es gibt keine Einschränkungen bei der Anwendung. Die Bestandteile sind ungefährlich wenn sie geschluckt werden.

INCI: Aloe Barbadensis Extract, Glycerin (pflanzlicher Herkunft), Xanthan Gum, Galactoarabinan Polyglucuronid Acid Crosspolymer*, Caprylyl Glycol

* patentierte bio-aktive Polysaccharide, EP 1 323 738 A1. WO 03/055918

Ohne Konservierungsstoffe.

Bitte nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der oben genannten Inhaltsstoffe.


Vertrieb: Ardo medical GmbH, Argelsrieder Feld 10, 82234 Oberpaffenhofen **PZN:** 4952565

Hersteller:

BioClin BV, Postfach 95
2600 AB Delft, Niederlande

Weitere Information: www.multi-mam.de

Für die Vorbeugung von wunden Brustwarzen und für den Schutz des Hautgewebes, verwenden Sie bitte Multi-Mam Balsam oder Multi-Mam Lanolin Brustwarzensalbe.

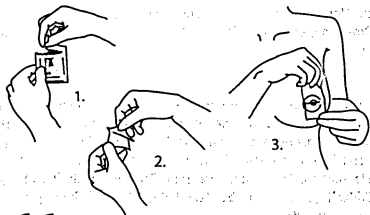

Wenn Medikamente des Guten zu viel sind, reine Hygiene aber nicht ausreicht

Multi-Gyn: Wirkungsvolle bio-aktive Intimpflege



Der Intimbereich einer Frau kann spezielle Probleme hervorrufen, die einen drastischen Einfluss auf die Lebensqualität bedeuten können. Fast jede Frau hat solche Probleme schon einmal gehabt: Ausfluss, unangenehmer Geruch, Juckreiz, Brennen, gereiztes Gewebe und auch Trockenheit im Vaginalbereich oder Fissuren (kleine Risse) am After. Diese Probleme sind häufig nicht stark genug, um den Gynäkologen aufzusuchen oder um ein Medikament zu verschreiben. Dennoch hilft auch die tägliche, normale Hygiene in diesen Fällen nicht aus. Was tun?

Multi-Gyn ist eine Serie natürlicher Intimpflegeprodukte zur Vorbeugung und Behandlung verschiedener Probleme, die keine Medikamente benötigen oder erlauben.

Multi-Gyn Intimpflegeprodukte sind bio-aktiv. Diese biologische Aktivität ist einzigartig und durch den Hauptbestandteil der Produkte, den patentierten Polysaccharid-Komplex zQR begründet. Dieser natürliche, aus einem Pflanzenextrakt gewonnene Komplex blockiert durch sein Haftvermögen an pathogene Bakterien das Festsetzen schädlicher Keime an die Vaginalschleimhaut und fördert zugleich die Entwicklung der wichtigen Laktobacilli.

zQR als Hauptbestandteil der Multi-Gyn Produkte:

- basiert nicht auf schädlichen Chemikalien oder giftigen Substanzen
- hat keinen negativen Einfluss auf wertvolle und nützliche Bakterien (Laktobacilli)
- hat keinen negativen Einfluss auf eigene Körperzellen und den natürlichen Heilungsprozess
- führt nicht zu Resistenzen
- hat keine negativen Nebeneffekte und ist absolut sicher
- kann bedenkenlos von Kindern und Schwangeren verwendet werden

zQR ist extrem effektiv, um eine Vielzahl bakterieller Probleme auf absolut sichere und natürliche Weise zu behandeln. Es ist der weltweit erste offiziell registrierte und patentierte, bio-aktive Bakterienblocker.

Multi-Gyn ist eine Serie natürlicher Intimpflegeprodukte zur Vorbeugung und Behandlung verschiedener Probleme, die keine Medikamente benötigen oder erlauben.

Bio-aktive Produkte von BioClin nehmen eine einzigartige Stellung in der persönlichen Intimpflege und natürlichen Selbstmedikation ein und enthalten weder Konservierungsstoffe, noch Bestandteile tierischen Ursprungs oder toxische Substanzen. **Sie sind zur Anwendung während Schwangerschaft und Stillzeit geeignet und besitzen keine Wechselwirkungen mit Arzneimitteln.**

Multi-Gyn Produkte für die Intimpflege:

Multi-Gyn FemilWash

Bio-aktiver Mikroschaum für die tägliche Hygiene. Milde und seifenfreie Intimwaschlotion für das natürliche Gleichgewicht im Intimbereich. 100ml, PZN: 4952660

Multi-Gyn LiquiGel

Bio-aktives Pflegegel für Wohlbefinden im Intimbereich. Lindert Trockenheit und Irritationen sofort durch natürliche Befeuchtung, 60ml, PZN: 4952654

Multi-Gyn ActiGel

Bio-aktives Gel zur Vorbeugung und Behandlung von bakterieller Vaginose und den damit zusammenhängenden Problemen wie Ausfluss, Geruch, Juckreiz, Reizungen, Empfindlichkeit, Rötungen und Wundheit. 50ml, PZN: 4952648

Multi-Gyn Analkompressen

Kompressen mit bio-aktivem Gel für das Wohlbefinden im Analbereich. Beugt Hämorrhoiden und Rissen (Analfissuren) vor, pflegt das Gewebe und schafft sofortige Erleichterung bei Analbeschwerden. 12 Einzelkompressen, PZN: 4867635

Multi-Gyn Vaginaldusche

Ergonomisch gestaltete Vaginaldusche zur Vaginalhygiene, Vorbeugung und Behandlung von vaginalen Infektionen und zur Unterstützung von antibakteriellen oder antimykotischen Behandlungen. PZN: 4952737

Multi-Gyn Brausetabletten

Zur Herstellung einer bio-aktiven Vaginalspüllösung. Sanfte Spüllösung mit natürlichen Inhaltsstoffen zur intensiven Vaginalhygiene, bei vaginalen Beschwerden, vaginalen Infektionen und deren Vorbeugung. 10 Tabletten, PZN: 4952743

Bio-aktive Intimpflegeprodukte entsprechen den Anforderungen der EG-Richtlinie 76/768/EEC bzw. 93/42/EWG.

Multi-Gyn Intimpflegeprodukte sind in jeder Apotheke und im ausgewählten Sanitätsfachhandel erhältlich.

Weitere Informationen unter www.multi-gyn.de

Alleinvertreib in Deutschland:

Ardo medical GmbH
Argelsrieder Feld 10
D-82234 Oberpaffenhofen
Tel. 08153 / 40 66 00
Fax. 08153 / 40 66 01
info@ardomedical.de
www.ardomedical.de

